



# Almofada inflável quadrada com orifício

cod. 7

# **INDICAÇÕES:**

- Pessoas que permanecem sentadas por longos períodos;
- Usuários de cadeira de rodas;
- · Convalescença de pós-operatório;
- Dores e lesões no cóccix;
- Para pessoas que buscam mais conforto no carro ou no escritório.

# **CARACTERÍSTICAS:**

- Por ser "aberta" permite melhor ventilação ao usuário:
- · Confortável. Flexível;
- Suporta até 130 kg.;
- Permite assepsia em todo o produto.

#### MODO DE USAR:

Com a almofada em pé coloque água até atingir a metade dela. Após colocar água, com a almofada sobre uma base e ainda com a válvula aberta, comprima-a suavemente para retirar o excesso de ar em seguida feche a válvula.

## **CUIDADOS:**

- 1) Evite sentar-se de forma súbita, repentina. Ao sentar, faça-o de forma suave.
- 2) Quantidade excessiva de água, rompe o produto e compromete o conforto do usuário.
- 3) Óleos, pomadas, e resíduos humanos (urina e fezes), ressecam o PVC e interfere na vida útil do produto.
- 4) Para fazer o tratamento da água, basta colocar 1 colher de sobremesa de água sanitária a cada 30 dias
- 5) Cuidado, NUNCA coloque sua Almofada em contato com objetos perfurocortantes.
- 6) Use água e sabão ou álcool 70° para higienizar a sua Almofada.

**COMPOSIÇÃO:** PVC – Policloreto de vinil virgem.

PESO LÍQUIDO: 0,200 kg.

COR: Azul.

## **TERMO DE GARANTIA**

O documento fiscal de venda e nele afixado a Etiqueta de Garantia, é o único comprovante que garante este Termo. Na hora da venda, o revendedor deve colar a Etiqueta de Garantia no documento fiscal de venda (a Etiqueta de Garantia se encontrada na parte superior interna da embalagem).

A garantia é de 120 dias, sendo 90 dias de garantia legal mais 30 dias de garantia estendida Auqasonus, a partir da data da emissão do documento fiscal de venda.

# **COMO USAR A GARANTIA**

Evite contato com a loja. Em caso de defeito de fábrica, fale direto com a fábrica: envie mensagem via WhatsApp: (11) 95806-3603 ou ligue SAC: (11) 3181-5533 ou envie e-mail para: sac@aquasonus.com.br ou Ouvidoria e-mail ouvidoria@aquasonus.com.br

IMPORTANTE: O produto só é substituído por um novo, após avaliação e constatação do defeito de fábrica. Se, ao invés de defeito de fábrica, for constatado estrago por uso inadequado, o consumidor recebe um laudo técnico e a devolução do produto no estado em que foi recebido pela fábrica. No caso de estrago por uso inadequado, revendedor e fabricante ficam isentos de trocar o produto ou ressarcir valores.

PRODUTOS COM ESTRAGOS POR USO INADEQUADO NÃO SÃO TROCADOS. EXEMPLOS:

- Furo deliberado ou acidental causado pelo uso de agulha, perfurocortantes, animais, etc.
- Produtos com válvula de ar preenchidos com água ou com válvula d'água preenchidos com ar.
- Rupturas por excesso de ar (excesso de ar rompe o produto e compromete o conforto do usuário).